





ISTITUTO STUDI ODONTOLATICI

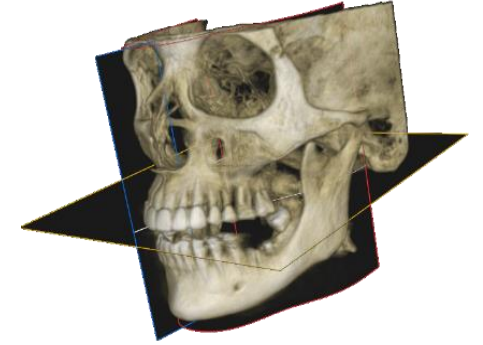

COMO INSTALAR EL VISOR DEL TOMOGRFO Y VER TU TOMOGRAFIA

- EN LA USB APARECERAN TRES ELEMENTOS:



- UNA CARPETA CON EL TITULO DE VOL ...
- EL PROGRAMA DEL VISOR
- UNA CARPETA CON ARCHIVOS COMPRIMIDOS

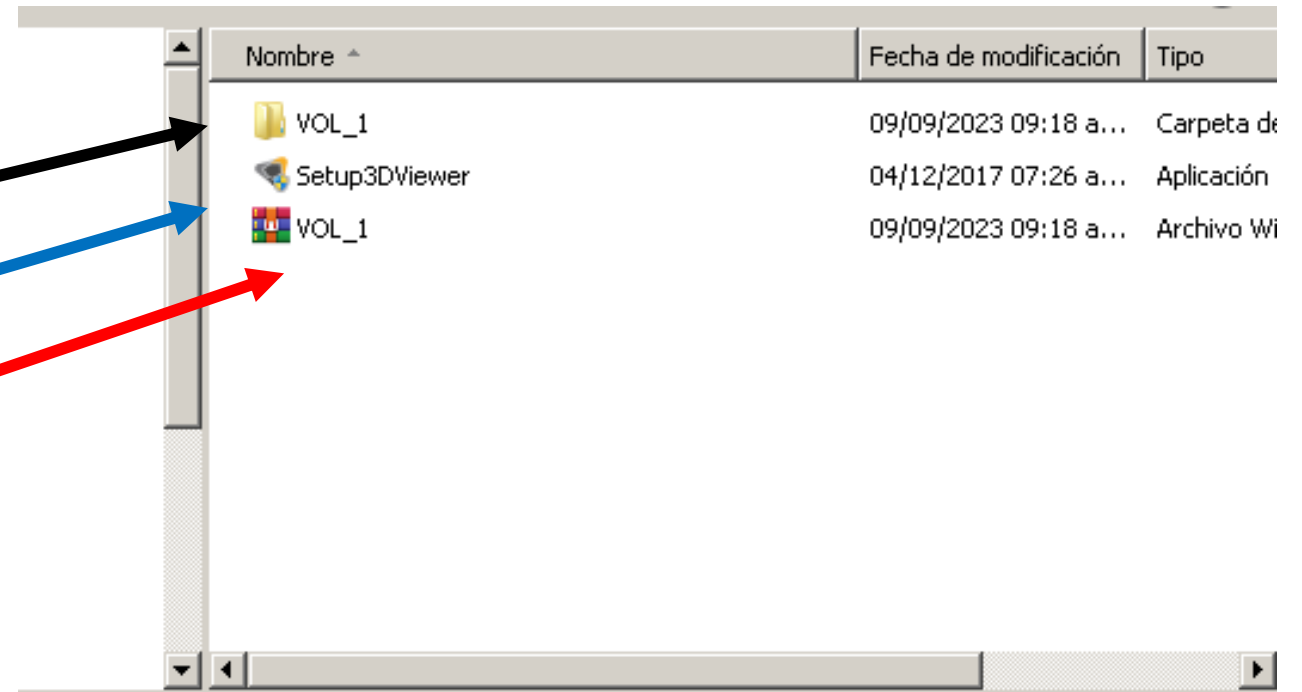

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
VOL_1	09/09/2023 09:18 a...	Carpeta de
Setup3DViewer	04/12/2017 07:26 a...	Aplicación
VOL_1	09/09/2023 09:18 a...	Archivo Wi


FORMA DE INSTALAR EL VISOR

- PARA INSTALAR EL VISOR
LE DAMOS DOBLE CLIC
EN EL ICONO
Setup3DVisor

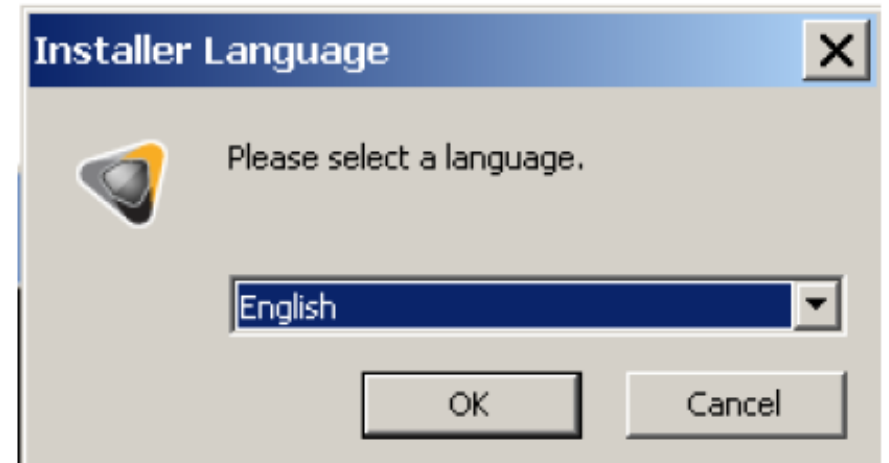
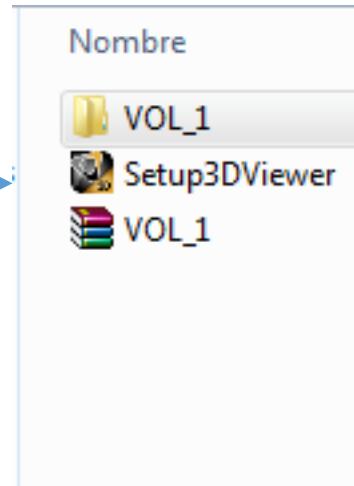


SELECCIONAMOS EL LENGUAJE EN
ESPAÑOL


- NOS APARECERA UNA PANTALLA DE INICIO DE INSTALACIÓN
- LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE SIGUIENTE

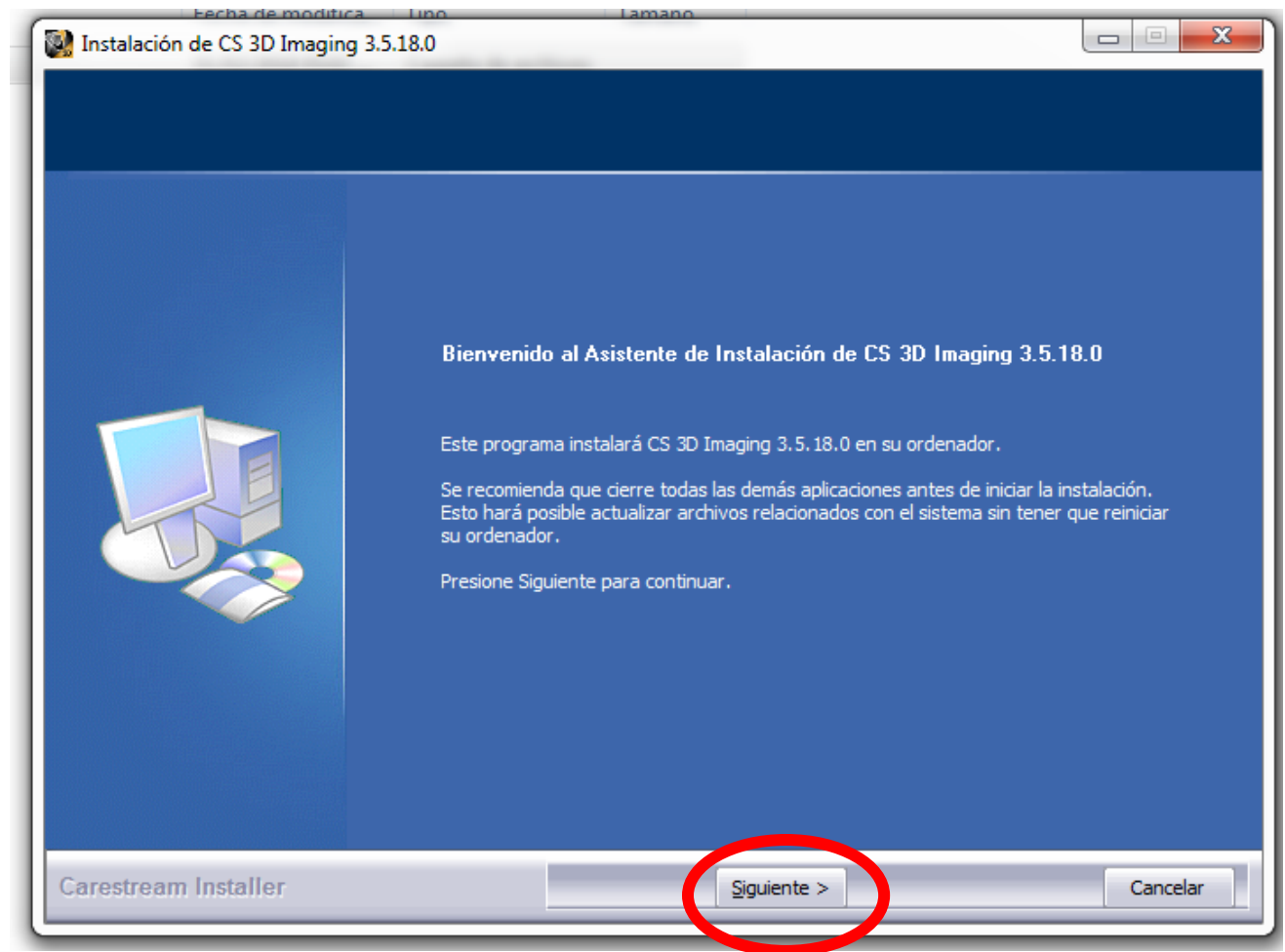


- SEGUIR LA INSTALACION DEL PROGRAMA Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA INSTALACION .
- ESCOGEMOS EL MODO DE APLICACIÓN “CENTRO RADIOLOGICO”
- EN EL NIVEL DE APLICACION ESCOGEMOS EL MODO “AVANZADO”

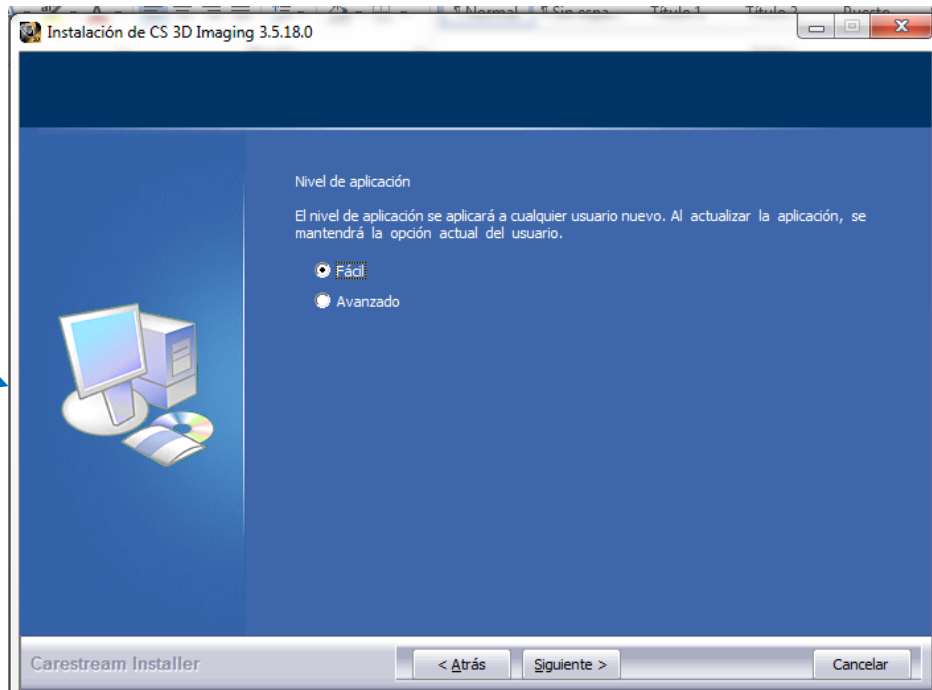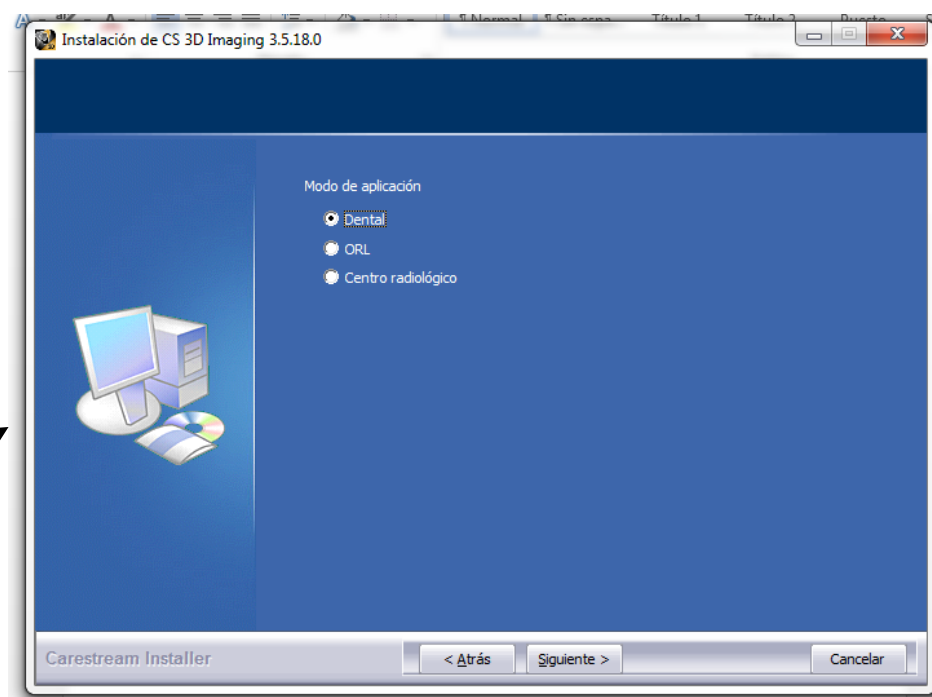


INSTALAR EL PROGRAMA

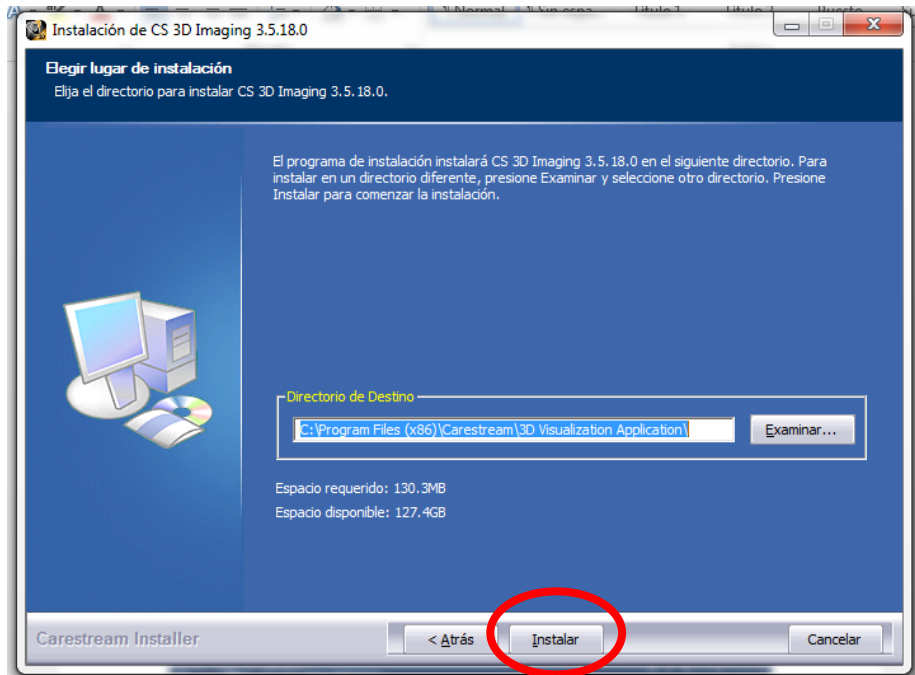

LE DAMOS CLIC DONDE DICE INSTALAR

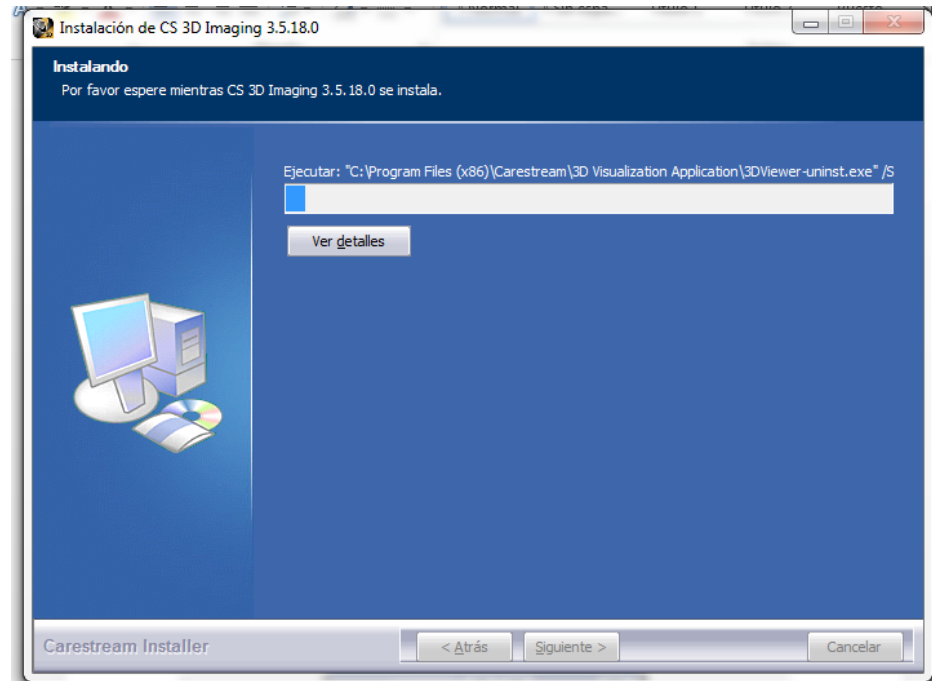

ESPERAMOS A QUE SE INSTALE EL PROGRAMA

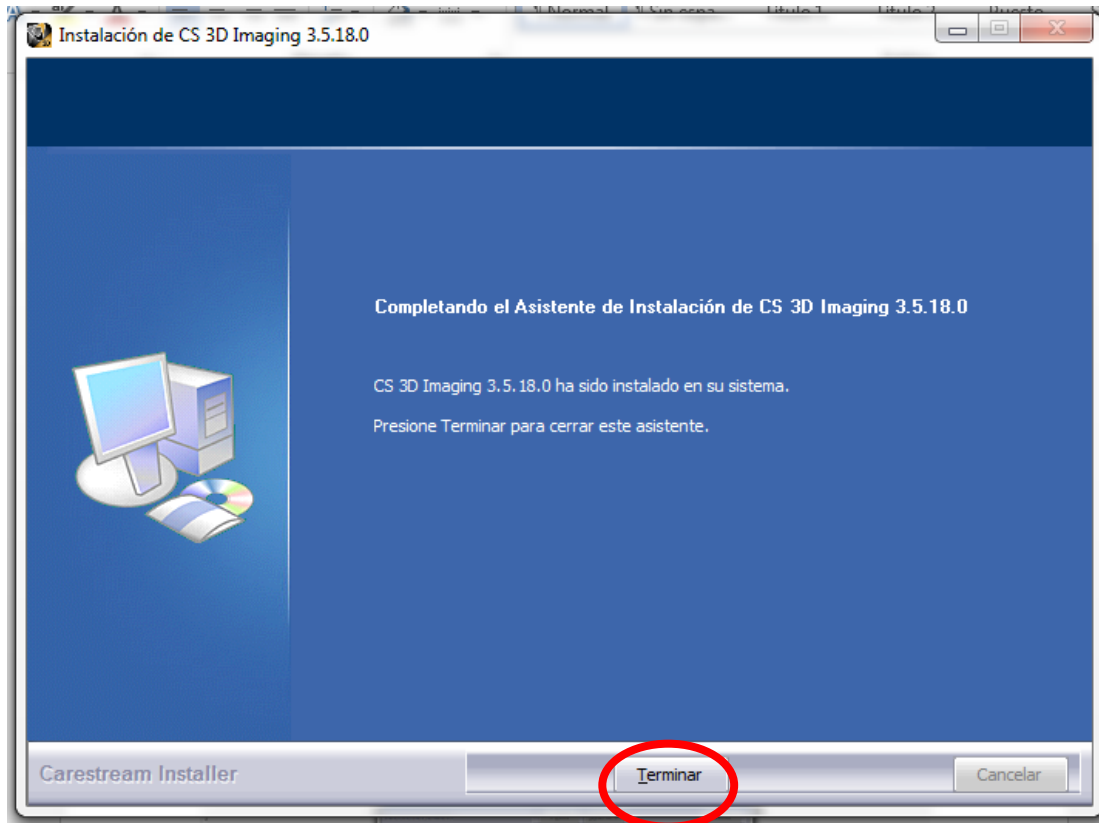


UNA VEZ COMPLETADO, LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE TERMINAR


EN EL ESCRITORIO DE LA COMPUTADORA, APARECERA EL ICONO DEL Setup3DVisor YA INSTALADO

PARA VER EL ARCHIVO DE LA TOMOGRAFIA


- UNA VEZ INSTALADO EL VISOR, REGRESAMOS DONDE ESTAN TRES ELEMENTOS DE LA USB.
- LE DAMOS DOBLE DONDE ESTA LA CARPETA QUE DICE “VOL ...”

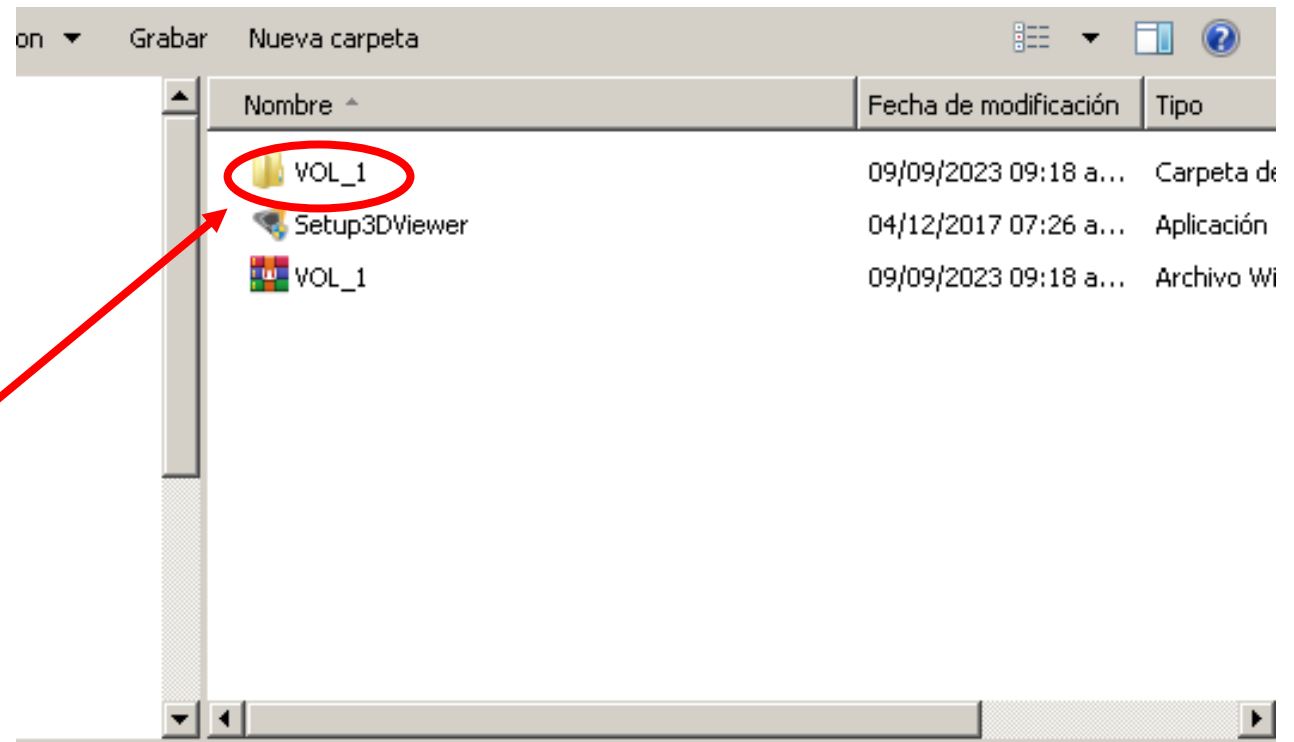


- NOS APARECERA UNA PANTALLA CON DOS CARPETAS Y VARIOS ARCHIVOS

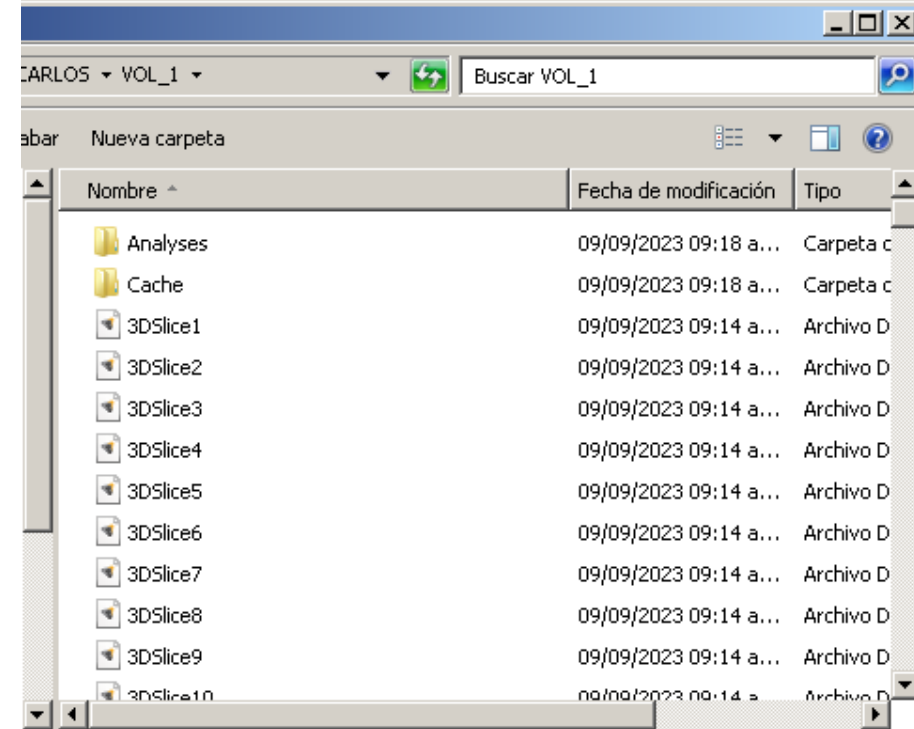


- SELECCIONAMOS UNO DE LOS ARCHIVOS

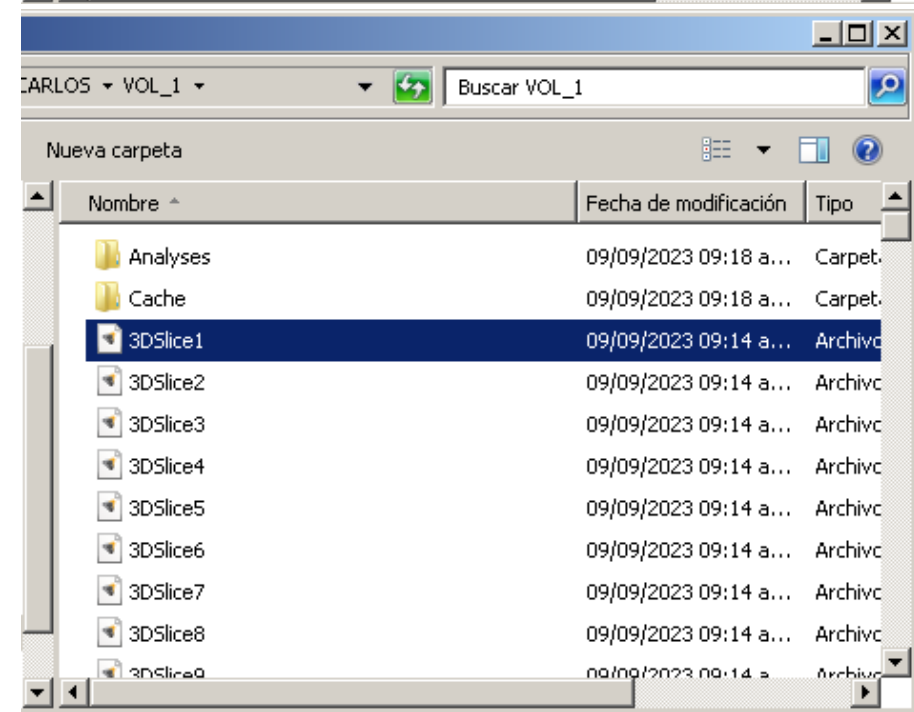

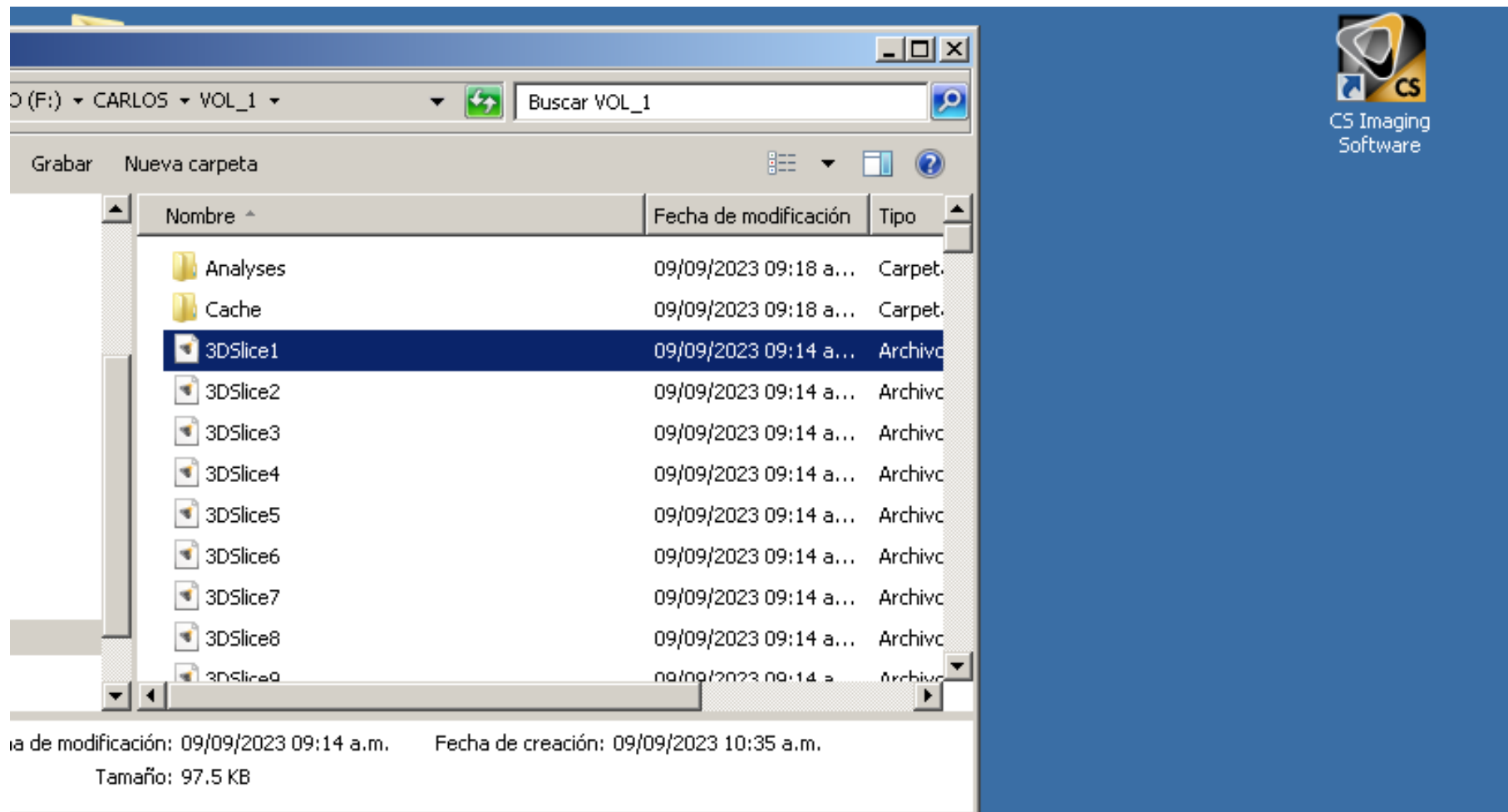


EL ARCHIVO SELECCIONADO LO ARRASTRAMOS AL ICONO
DEL VISOR

LE DAMOS UNOS SEGUNDOS

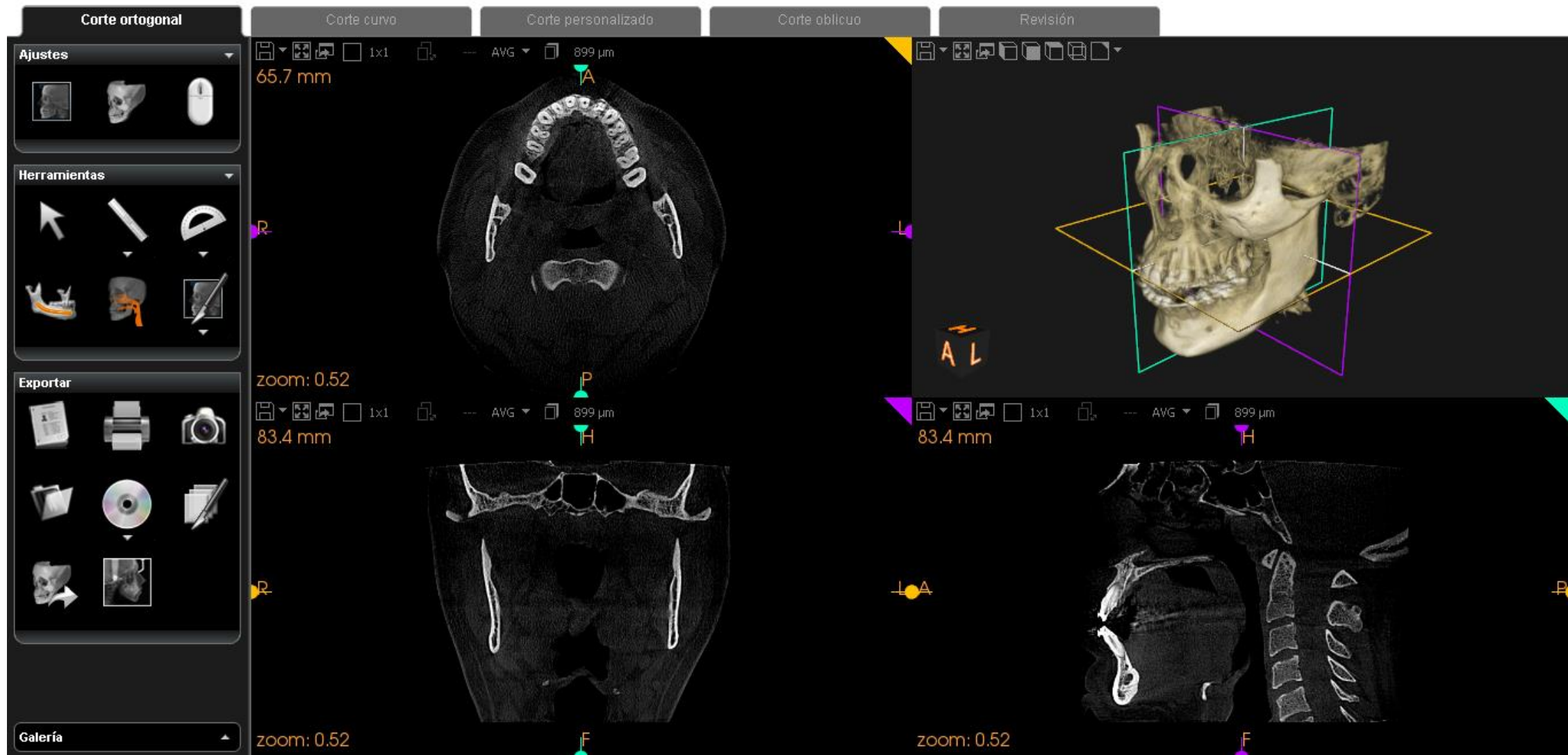


NOS APARECERA DE ESTA FORMA LA PANTALLA DE INICIO

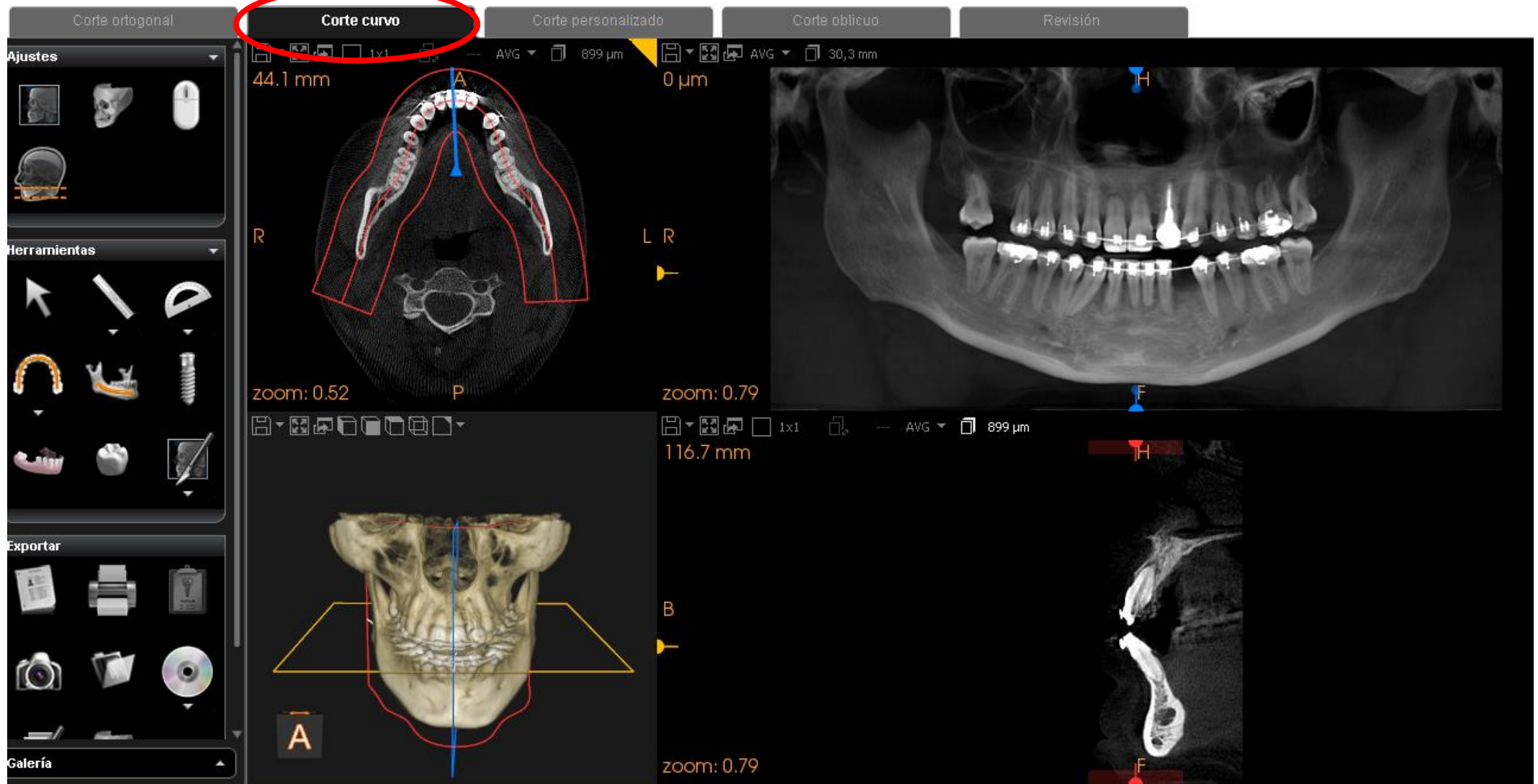

LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE CORTE CURVO



ALGUNAS VECES PUEDE APARECER ASÍ LA PANORAMICA, PARA VERLA COMPLETA LE DAMOS CLIC DONDE DICE AJUSTAR INTEGRACION

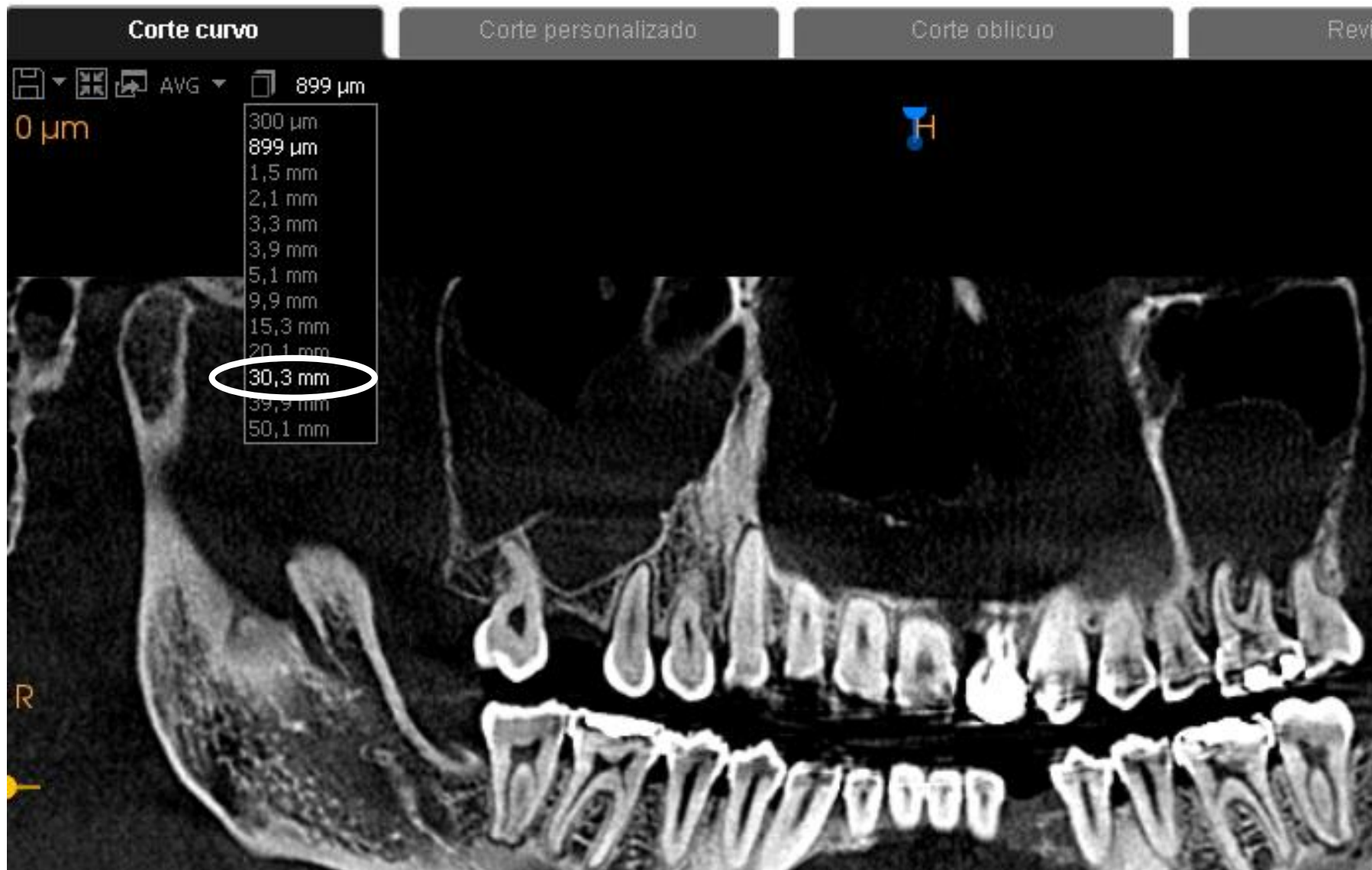

LE DAMOS CLIC DONDE DICE 30.3 MM Y EN AUTOMATICO SE VA AJUSTAR LA IMAGEN PANORAMICA

Corte curvo


Corte personalizado

Corte oblicuo


Revisión

AVG 30,3 mm


0 μ m

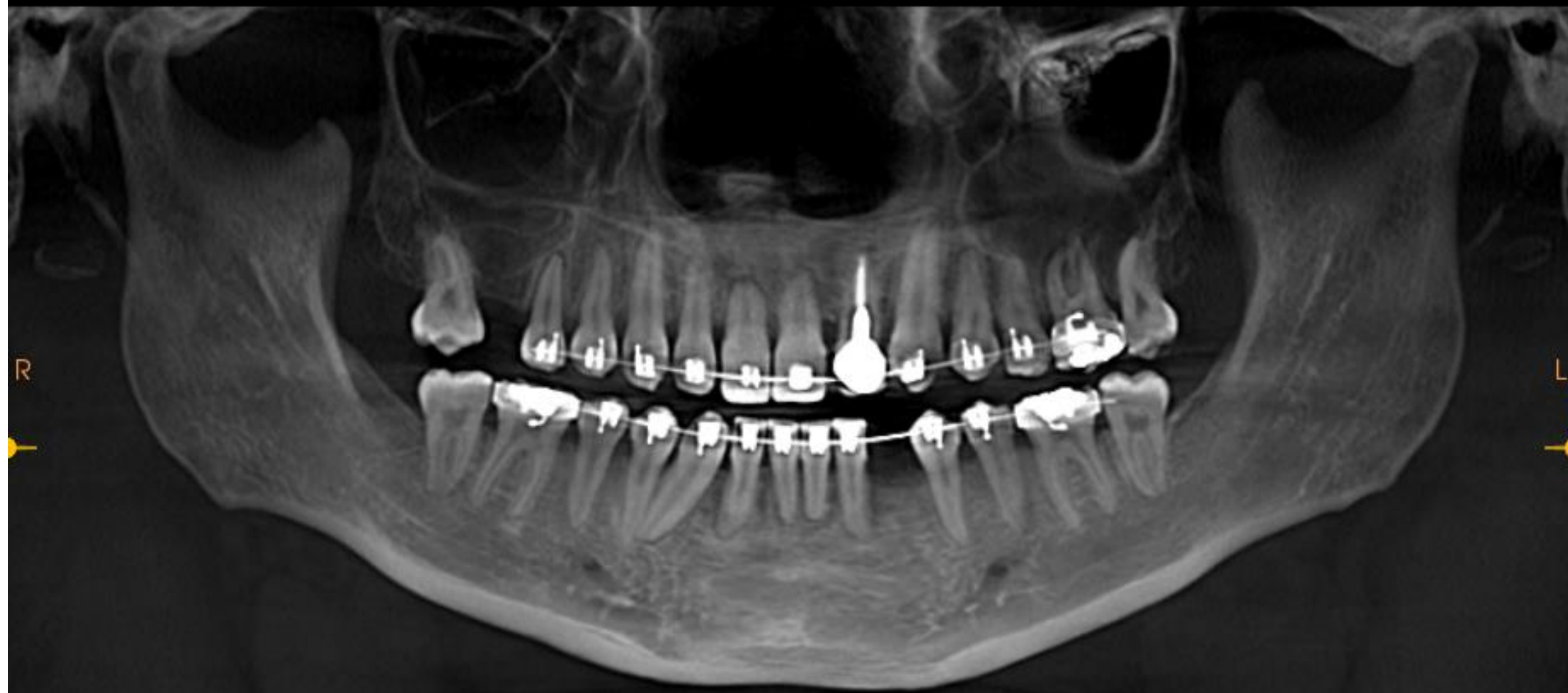


En el caso de que no se
llegue ver la imagen 3D

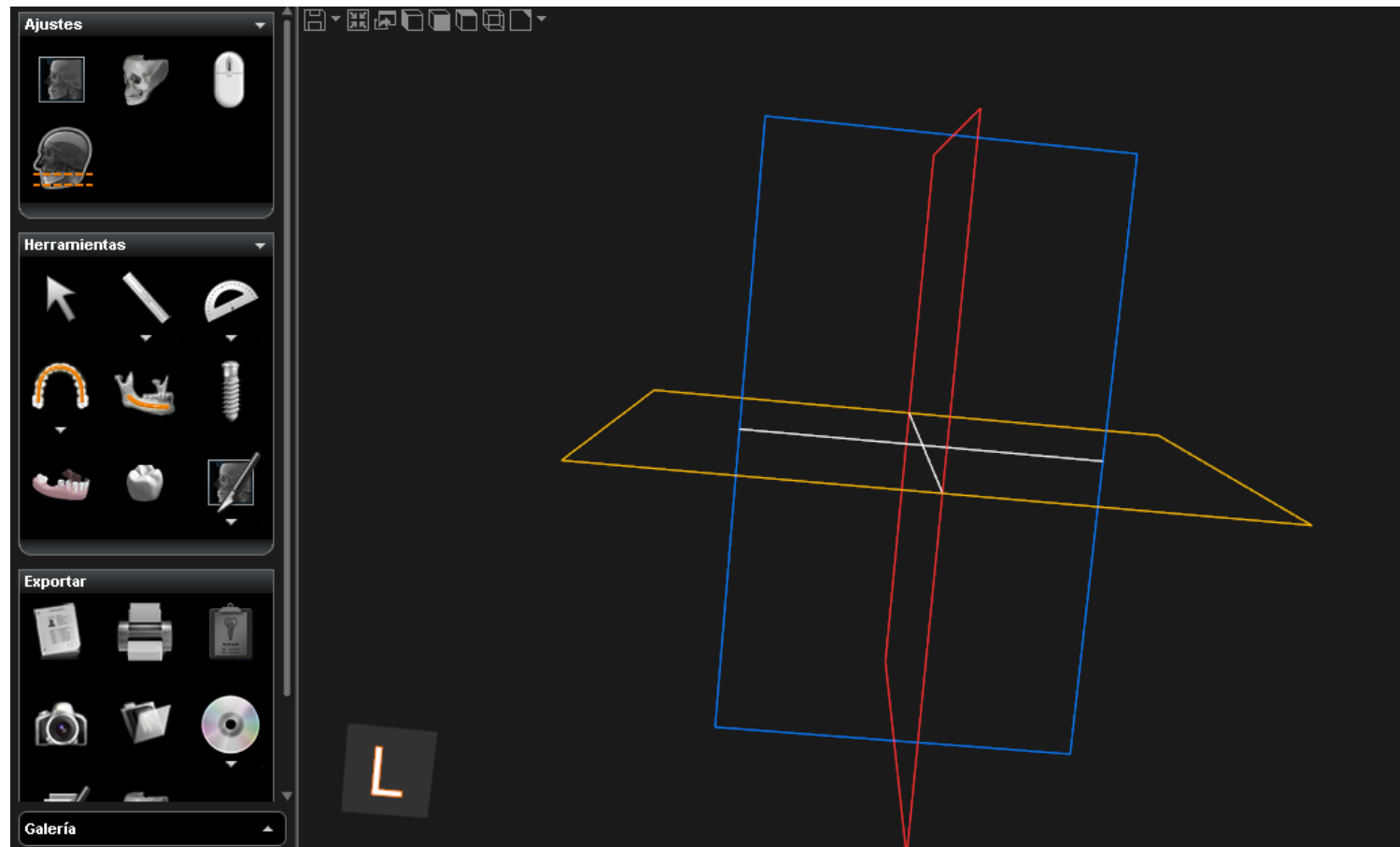


- DE LADO SUPERIOR DERECHO VERA UN LOGO DE UNOS ENGRANES Y LE DAMOS CLIC

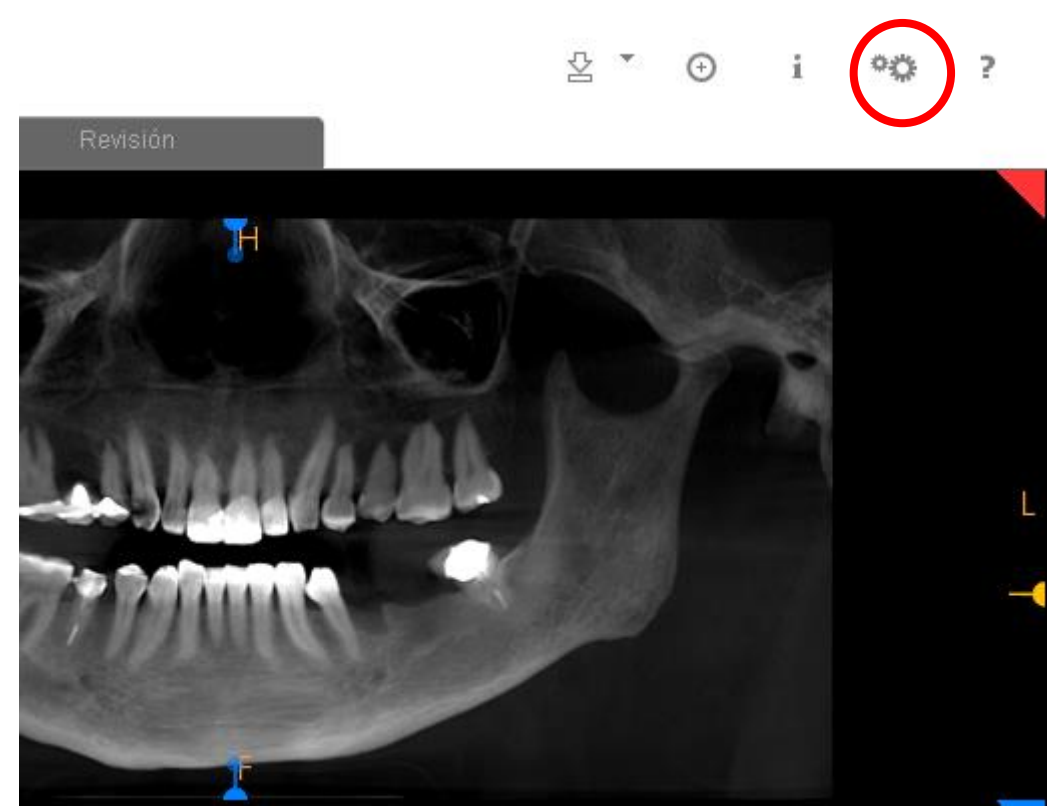

- NOS MOSTRARA EL MENU DE CONFIGURACIÓN.
- LE DAMOS CLIC DONDE TIENE LA IMAGEN DE UN CRANEO

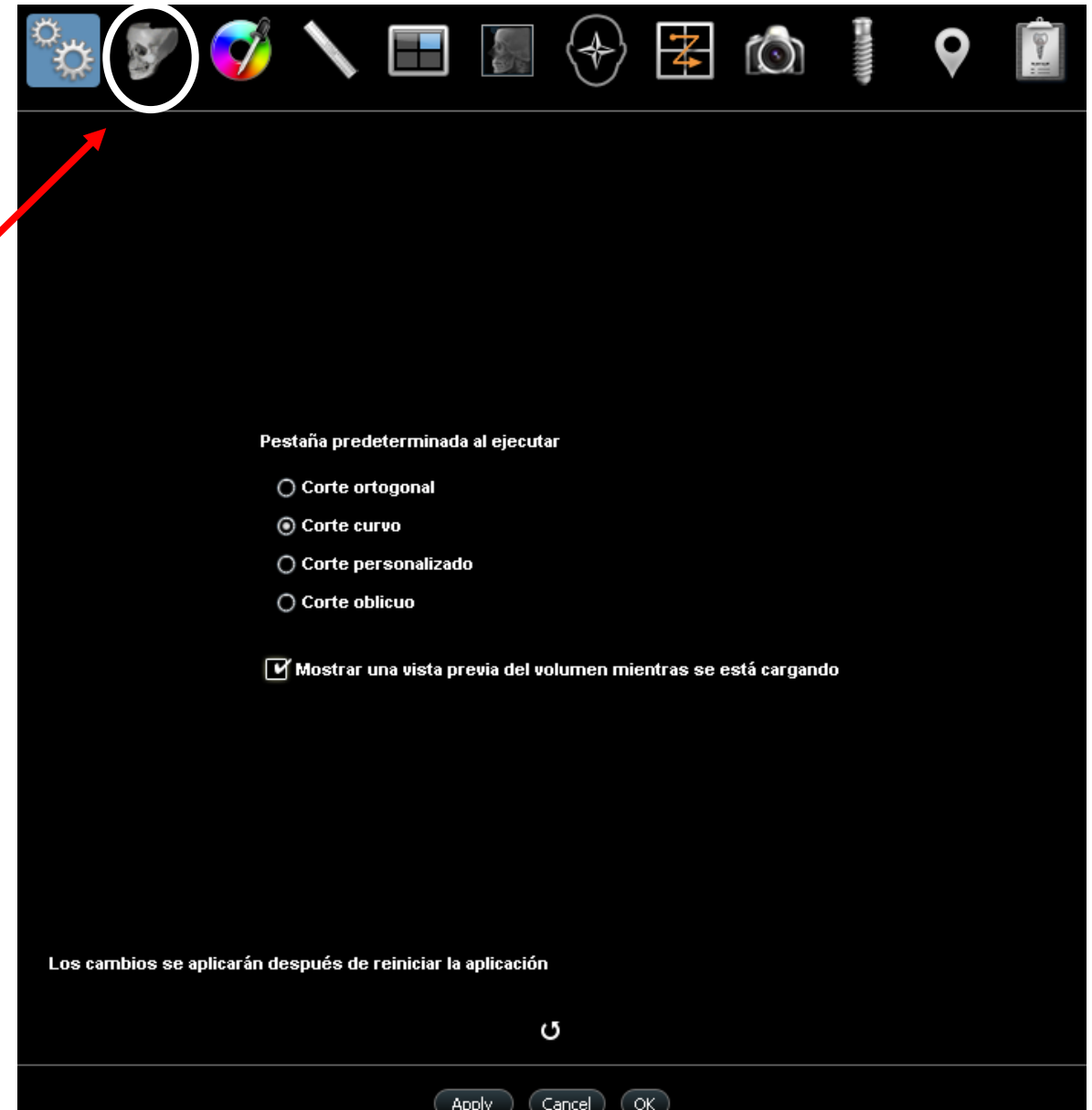

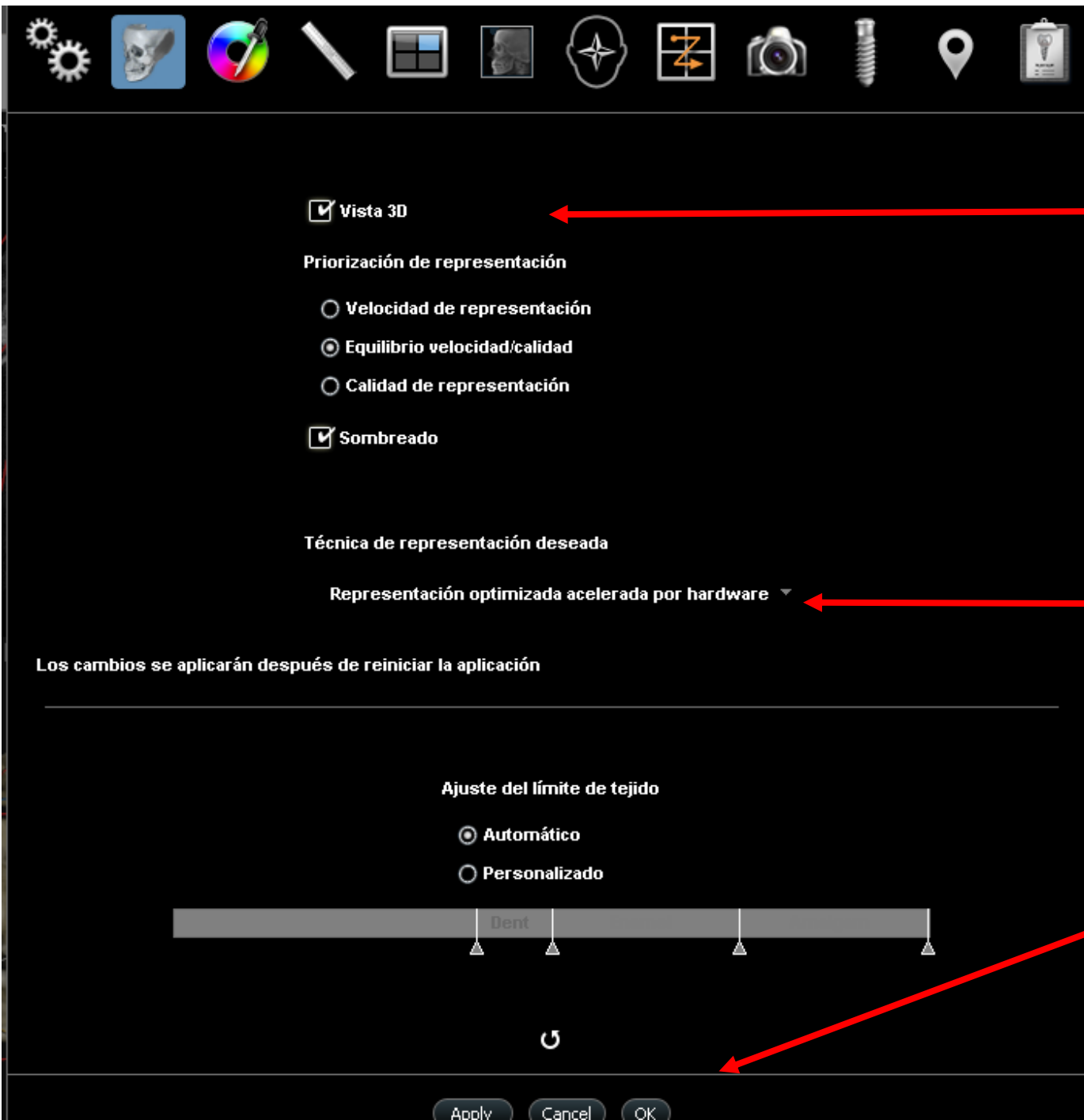

PALOMEAR DONDE
DICE VISTA 3D

MODIFICAR DONDE DICE
REPRESENTACION DE
SOFTWARE

LE DAMOS CLIC DONDE
DICE APLICAR O APPLY Y
DESPUES DAMOS CLIC EN
OK